



## RYCHLÝ PRŮVODCE - Čeština




eFOLDi

### Rozložení koloběžky eFOLDi Lite


Před nastartováním postavte skútr vzpřímeně v otevřeném prostoru mimo domácí zvířata a malé děti.

Rozložení koloběžky je jednoduché a s trochou cviku ji zvládnete postavit během několika sekund.

Než se poprvé vydáte ven, doporučujeme vám na skútru trénovat.

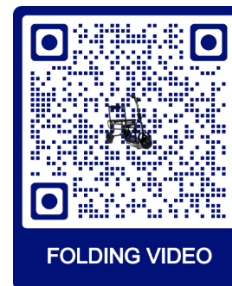

1 Uvolněte žlutou západku sloupku řízení...

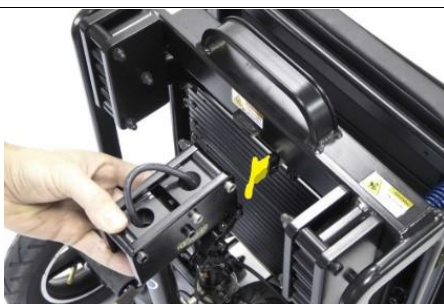

2 ...a nechte sloup volně se houpat.



3 Vytáhněte řídítka ven a nahoru..



4 ...dokud nezapadnou do svíslé linie.



5 Najděte malou žlutou páčku na boku a zatažením uvolněte sestavu předního kola.



6 Podržte sloupek řízení a opěradlo sedadla a odtáhněte je od sebe...



7 ...skútr se rozloží, když odtáhněte opěradlo sedadla a sloupek řízení a...



8 ...skútr se sám uzamkne v otevřené poloze.



9 Ujistěte se, že uzamykací západky zapadly do ocelové tyče...



10 ...pokud ne, sešlápněte nohu na stupačku, aby se koloběžka otevřela.



11 Pokud ještě nejsou nainstalované, použijte sedák a opěradlo podle obrázku.



12 Zkontrolujte, zda je magnetická brzda v poloze ZAMKNUTO, aby se zapnul motor.

## Skládání koloběžky eFOLDi Lite

		
1 Sklopte opěradlo sedadla dolů k základně sedadla.	2 Pokud má skútr loketní opěrky, zatáhněte za černou páčku pro uvolnění a poté sklopte opěradlo dolů podle (1)	3 Stiskněte a podržte malou žlutou západku na sloupcu řízení...
		
4 a sklopte sloupek dolů, dokud je uzamčena magnetickou západkou	5 Pevně uchopte skútr za sloupek řízení a rukojeť a pevně zatlačte sloupek dolů k stupačce	6 Nakloňte skútr šikmo dozadu a použijte nohu za volantem, abyste zabránili jeho pohybu směrem od vás
		
7 ..zatlačte na sloupek řízení, dokud přední kolo nezapadne na místo...	8 ...a západka sloupku řízení se zablokuje.	9 Zatlačením na sloupek řízení jej pevně zajistíte k rámu.

## Provoz eFOLDi Lite

		
Chcete-li koloběžku zapnout, stiskněte šedé tlačítko pod displejem baterie. Zvolte (D) Drive nebo (R) Reverse a pro jízdu stiskněte páčku plynu.	Baterii lze nabíjet pomocí nabíjecího portu, jak je znázorněno. Baterii vždy co nejdříve dobijte pokud je to možné, když je displej označující jantar.	Baterii lze vyjmout zvednutím západky a zvednutím baterie nahoru. Po vyjmutí lze baterii nabíjet pomocí zásuvky na boční straně baterie.

Upozorňujeme, že tento leták má sloužit pouze jako rychlý průvodce. Úplné pokyny naleznete v uživatelské příručce k produktu. Jakékoli dotazy, zavolejte nám na číslo 0800 915 0800 nebo napište e-mail na adresu hello@efoldi.com