



Før brug skal eFOLDi Lite placeres i et åbent område væk fra kæledyr og små børn. Det er nemt at folde den ud, og med lidt øvelse kan du sætte den op på få sekunder. Vi anbefaler, at du øver dig inden din første tur.



SÅDAN FOLDER DU UD

TRIN 1 - FRIGØR RATSTAMMEN

Fjern al emballage, før du begynder.



Tryk på den gule lås for at frigøre ratstammen, så den kan svinge fri.

Løft styret udad og opad, indtil det klikker sikkert fast i lodret position.

TRIN 2 - LÅS OP OG FOLD UD



Hold fast i ratstammen og find den lille gule knap på siden af Lite, og træk i den for at låse forhjulsenheden op.

Hold fast i ratstammen og ryglænet, og træk dem fra hinanden. Scooteren folder sig ud, og du hører et klik, når den låses i sin åbne position.

TRIN 3 - AFSLUTTENDE SIKKERHEDSTJEK



Sørg for, at låsene er forsvarligt fastgjort til stålstangen ved at trykke foden ned på fodpladen.



Kontrollér, at det røde magnetiske bremsehåndtag er i LOCKED-position for at aktivere motoren.

AT KOMME I GANG



Tænd for løbehjulet ved at trykke på den grå knap under batteriskærmen. Vælg (D) for Drive eller (R) for Reverse, og tryk derefter på tommelfingergrebet for at køre. Sørg for at genoplade batteriet, når displayet viser gult.

SÅDAN BETJENES DU



For at omdanne scooteren til rullende bagage skal du trække styret op og trykke på det gule håndtag, så det fastgøres på det andet stoppunkt.



For at oplade skal du tilslutte strømforsyningskablet til opladningsporten øverst på ratstammen.



For at fjerne batteriet skal du løfte låsen og forsigtigt trække det opad.

Opladningsporten er placeret på siden af batteriet.

SÅDAN FOLDER DU

TRIN 1 - FOLD RYGLÆNET OG RATSTAMMEN SAMMEN



Fold ryglænet fladt ned mod sædeunderlaget.



Tryk og hold på den lille gule lås på forsiden af ratstammen, og fold den derefter ned, indtil styret klikker på plads, sikret af magneten.



Med armlæn monteret, træk i den sorte knap for at frigøre sædet og folde det sammen.

TRIN 2 - FOLD SCOOTEREN SAMMEN OG LÅS DEN



Tag fat i scooteren ved ratstammen og bærehåndtaget, og løft sæderammen op i lodret position.



Vip løbehjulet tilbage i en vinkel (du kan bruge din fod bag hjulet til at stabilisere det, hvis det er nødvendigt), og afbalancer det på hjulene.



Tryk ratstammen indad, indtil forhjulet og låsen klikker sikkert på plads. Tryk derefter hårdt på søjlen for at låse den fast mod rammen.



Bemærk, at denne folder kun er tænkt som en hurtig vejledning. For fuldstændige instruktioner henvises til vores produktmanual. Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til os på +44 800 915 0800 eller sende en e-mail til services@efoldi.com.