



HURTIGGUIDE – DANSK



eFOLDi

Udfoldning af eFOLDi Lite Scooter

Før du starter, skal du stille scooteren oprejst i et åbent rum væk fra kæledyr og små børn.

Det er nemt at folde scooteren ud, og med lidt øvelse vil du være i stand til at sætte den op på få sekunder.

Vi råder dig til at øve dig med scooteren, før du begiver dig ud for første gang.



1

Slip den gule ratstammelås...



2

og lad søjlen svinge frit.



3

Træk styret ud og opad.



4

...indtil de låser sig i en lodret linje.



5

Find en lille gul vippe på siden, og træk for at frigøre forhjulssamlingen.



6

Hold ratstammen og ryglænet og træk dem fra hinanden...



7

...scooteren folder sig ud, når du trækker sæderyggen og ratstammen fra hinanden og...



8

... scooteren låser sig selv i sin åbne position.



9

Sørg for, at låselåsene er låst til stålstangen...



10

...hvis ikke, tryk din fod ned på fodpladen for at låse scooteren åben.



11

Hvis det ikke allerede er monteret, påfør sædehynderne og ryglænet som vist.



12

Kontroller, at den magnetiske bremse er i LÅST position for at aktivere motoren.

Sammenfoldning af eFOLDi Lite Scooter

1 Fold sædets ryglæn ned til sædebunden.	2 Hvis scooteren har armlæn, skal du trække i den sorte vippe for at udløse, og derefter folde ryglænet ned som i (1)	3 Tryk og hold den lille gule lås på ratstammen...
4 ...og fold søjlen ned indtil det er låst af magnetlåsen.	5 Hold godt fast på scooteren i ratstammen og bærehåndtaget, og pres søjlen ned mod fodpladen	6 Vip scooteren tilbage i en vinkel, og brug din fod bag rattet for at forhindre, at den bevæger sig væk fra dig
7 ..tryk indad på ratstammen, indtil forhjulet låser på plads...	8 ...og ratstammens lås låses i position.	9 Tryk ratstammen ind for at låse den tæt mod rammen.

FOLDi Lite Betjening

Tryk på den grå knap under batteridisplayet for at tænde for scooteren. Vælg (D) Drive eller (R) Reverse, og tryk på tommelfingergashåndtaget for at gå..	Batteriet kan oplades ved hjælp af opladningsporten som vist. Oplad altid batteriet så hurtigt som muligt, når displayet er indikerer rav.	Batteriet kan fjernes ved at løfte låsen og løfte batteriet opad. Efter fjernelse kan batteriet oplades ved hjælp af stikket på.

Bemærk venligst, at denne folder kun er beregnet til at være en hurtig vejledning. For fuldstændige instruktioner henvises til vores brugermanual. Eventuelle spørgsmål, ring til os på 0800 915 0800 eller e-mail hello@efoldi.com