



Plaats de eFOLDi Lite voor gebruik op een open plek, uit de buurt van huisdieren en kleine kinderen. Uitvouwen is eenvoudig en met wat oefening kun je hem in een paar seconden opzetten. We raden aan te oefenen voor je eerste uitstapje.



## HOE ONTVOUWEN

### STAP 1 - DE STUURKOLOM LOSMAKEN

Verwijder alle verpakking voordat je begint.



Druk op de gele vergrendeling om de stuurkolom te ontgrendelen, zodat deze vrij kan bewegen.

Til het stuur naar buiten en omhoog totdat het stevig in verticale positie vastklikt.

### STAP 2 - ONTGRENDELEN EN UITVOUWEN



Houd de stuurkolom vast en zoek de kleine gele hendel aan de zijkant van de Lite en trek eraan om het voorwiel te ontgrendelen.

Houd de stuurkolom en rugleuning vast en trek ze uit elkaar. De step klappt uit en je hoort een klik als hij in zijn open positie wordt vergrendeld.

### STAP 3 - LAATSTE VEILIGHEIDSCONTROLES



Zorg ervoor dat de vergrendelingen goed vastzitten op de stalen stang door je voet op de voetplaat te drukken.



Controleer of de rode magnetische remhendel in de stand VERGRENDELD staat om de motor in te schakelen.

## AAN DE SLAG



**Om de step aan te zetten**, druk je op de grijze knop onder het batterijscherm. Selecteer (D) voor Rijden of (R) voor Achteruit en druk vervolgens op de duimgashendel om te gaan. Laad de accu op zodra de display oranje aangeeft.

## HOE TE BEDIENEN



**Om van de scooter rollende bagage te maken**, trek je de duwstang omhoog en druk je de gele hendel in, waardoor deze op het tweede stoppunt vast komt te zitten.



**Om op te laden**, sluit je de voedingskabel aan op de oplaadpoort bovenaan de stuurkolom.



**Om de batterij te verwijderen**, tilt u de vergrendeling op en trekt u deze voorzichtig omhoog.

De oplaadpoort bevindt zich aan de zijkant van de batterij.

## HOE OPVOUWEN OM OP TE BERGEN

### STAP 1 - KLAP DE RUGLEUNING & STUURKOLOM IN



Klap de rugleuning plat tegen de zitting.



Houd de kleine gele vergrendeling aan de voorkant van de stuurkolom ingedrukt en klap deze vervolgens omlaag tot de stuurstang vastklikt, vastgezet door de magneet.

**Met arMLEUNINGEN gemonteerd**,

Trek aan de zwarte hendel om de stoel te ontgrendelen en in te klappen.

### STAP 2 - DE SCOOTER INKLAPPEN EN VERGRENDELEN



Pak de step vast bij de stuurkolom en de draagbeugel en til het zitframe op tot een rechtopstaande positie.



Kantel de step naar achteren in een hoek (je kunt je voet achter het stuur gebruiken om hem stabiel te houden als dat nodig is) en laat hem balanceren op de wielen.



Druk de stuurkolom naar binnen totdat het voorwiel en de vergrendeling stevig vastklikken. Duw de kolom vervolgens stevig aan om hem stevig tegen het frame te vergrendelen.

