



# BEKNOPTE HANDLEIDING NEDERLAND



eFOLDi

## De eFOLDi Power Chair uitvouwen

Voordat u begint, plaatst u de Power Chair in een open ruimte, uit de buurt van huisdieren en kleine kinderen.

Het uitvouwen is eenvoudig en met een beetje oefening kun je het binnen enkele seconden instellen.

Wij adviseren u om te oefenen met de Power Chair voordat u er voor het eerst



**1**

Anti-tip wielen en batterijlader worden bij uw elektrische rolstoel geleverd.

**2**

Monteer de anti-kiepwielen. Deze worden eenvoudig op hun plaats gedrukt en vergrendeld.

**3**

Vouw de elektrische rolstoel uit door simpelweg de onderkant van de zitting naar beneden te duwen terwijl u de ontgrendelingshendel omhoog trekt.



**4**

Installeer armleuningsteunen in de sleuven en druk ze naar beneden totdat ze vastklikken.  
**Houd kabels uit de buurt van knelpunten**

**5**

Pak de controller unit en staaf en...

**6**

...steek de bedieningsstang in de armleuning die onder de armleuning past.



**7**

pas de positie van de controller aan en draai vast met de gekartelde knop.

**8**

\_ Verwijder de bediening voor begeleiders uit de achterzak en bevestig deze aan de stang aan de achterkant.

**9**

Voetsteun naar beneden trekken.



**10**

installeer zitkussens zoals afgebeeld. Deze worden op hun plaats gehouden door klittenbandlipjes. Zorg dat deze gevouwen zijn

**11**

Plaats de batterijen totdat ze vastklikken. Uw elektrische rolstoel is nu klaar.

**12**

Schakel de elektrische rolstoel in door op de AAN/UIT-knop te drukken. Raadpleeg uw handleiding voor volledige informatie.


## De eFOLDi elektrische rolstoel opvouwen

		
<p><b>1</b> Schakel de stroom uit met de POWER-knop op de handcontroller. <b>Schakel altijd de stroom uit wanneer de stoel niet in gebruik is om de batterij te sparen.</b></p>	<p><b>2</b> Draai de gekartelde knop iets los en verwijder de controller. Plaats de controller en veiligheidsgordel op het zitkussen. <b>Draai de knop weer vast om verlies te voorkomen.</b></p>	<p><b>3</b> Verwijder de begeleiderbediening en plaats deze in de zak aan de achterkant van de stoel.</p>
		
<p><b>4</b> Controleer of de voorwielen naar voren zijn gepositioneerd om soepel opvouwen te garanderen. <b>Tip</b> trek de stoel naar achteren om de wielen uit te lijnen</p>	<p><b>5</b> Reik onder de rand van de stoel en trek de ontgrendelingsstang omhoog om de stoel los te maken en...</p>	<p><b>6</b> ...trek de stoel omhoog en naar u toe om de elektrische rolstoel in te klappen. Voetsteun inklappen.</p>

## Batterij van de eFOLDi elektrische rolstoel wordt opgeladen

		
<p>Om de elektrische rolstoel op te laden, steekt u het oplaadsnoer in de basis van de joystickcontroller en sluit u de wisselstroomstekker aan op een stopcontact. Hierdoor worden <b>BEIDE</b> batterijen tegelijkertijd opgeladen.</p>	<p>Om batterijen te verwijderen voor reizen of individueel opladen, drukt u het rode lipje omhoog en schuift de batterij naar achteren.</p>	<p>Batterijen kunnen afzonderlijk van de stoel worden opgeladen door gebruik te maken van de korte 'pigtail'-adapter die eerst op de oplaadkabel moet worden aangesloten.</p>

## eFOLDi Power Chair Operation

		
<p>De handsetcontroller heeft knoppen om de snelheid aan te passen en displays om het resterende vermogen en de snelheidsinstelling aan te geven.  U kunt de achteruitrijdsirene uitschakelen door op de aangegeven knop te drukken.</p>	<p>De oplaadpoort voor uw elektrische rolstoel bevindt zich onder de handset om <b>BEIDE</b> batterijen tegelijkertijd op te laden.  Er is ook een USB-uitgang om een telefoon of ander USB-apparaat van stroom te voorzien.</p>	<p>De begeleidersbediening kan worden ingesteld om de loopsnelheid aan te passen voor een begeleider/verzorger en biedt tevens een batterijcontrole.  De hendel regelt de achterwaartse of voorwaartse beweging.</p>