


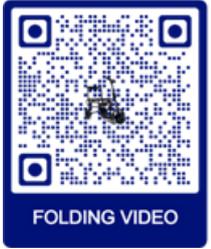

Avant de l'utiliser, placez l'eFOLDi Lite dans un endroit ouvert, à l'écart des animaux domestiques et des jeunes enfants. Le dépliage est facile et, avec de l'entraînement, vous pouvez l'installer en quelques secondes. Nous vous recommandons de vous entraîner avant votre première sortie.



COMMENT DÉPLIER

ÉTAPE 1 - DÉGAGER LA COLONNE DE DIRECTION

Retirez tous les emballages avant de commencer.



Pousser le loquet jaune pour libérer la colonne de direction, ce qui permet de la faire pivoter.

Soulever le guidon vers l'extérieur et vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche fermement en position verticale.

ÉTAPE 2 - DÉVERROUILLER ET DÉPLIER



Tenez la colonne de direction et localisez le petit bouton jaune sur le côté du Lite et tirez-le pour déverrouiller l'assemblage de la roue avant.

Tenez la colonne de direction et le dossier du siège et séparez-les. Le scooter se dépliera et vous entendrez un clic lorsqu'il se verrouillera en position ouverte.

ÉTAPE 3 - DERNIERS CONTRÔLES DE SÉCURITÉ



Assurez-vous que les loquets de verrouillage sont solidement fixés à la barre d'acier en appuyant votre pied sur le repose-pied.



Vérifiez que le levier rouge du frein magnétique est en position verrouillée pour engager le moteur.

COMMENT FONCTIONNER

POUR COMMENCER



Pour mettre le scooter en marche, appuyez sur le bouton gris situé sous l'affichage de la batterie. Sélectionnez (D) pour la conduite ou (R) pour la marche arrière, puis appuyez sur l'accélérateur pour démarrer. Veillez à recharger la batterie dès que l'écran affiche l'ambre.



Pour transformer le scooter en bagage à roulettes, tirez le guidon vers le haut et appuyez sur le levier jaune, en le fixant sur le deuxième point d'arrêt.



Pour charger, connectez le câble d'alimentation au port de charge situé en haut de la colonne de direction.



Pour retirer la batterie, soulevez le loquet et tirez-la délicatement vers le haut. Le port de chargement est situé sur le côté de la batterie.

COMMENT PLIER

ÉTAPE 1 - PLIER LE DOSSIER ET LA COLONNE DE DIRECTION



Rabattre le dossier du siège à plat contre la base du siège.



Appuyez sur le petit loquet jaune situé à l'avant de la colonne de direction et maintenez-le enfoncé, puis rabattez-le vers le bas jusqu'à ce que le guidon s'enclenche, sécurisé par l'aimant.



Lorsque les accoudoirs sont installés, tirez sur la bascule noire pour libérer le siège et le plier.

ÉTAPE 2 - FERMETURE ET VERROUILLAGE DU SCOOTER



Saisissez le scooter par la colonne de direction et la poignée de transport et soulevez le cadre du siège en position verticale.



Inclinez le scooter vers l'arrière (vous pouvez utiliser votre pied derrière la roue pour le stabiliser si nécessaire), en l'équilibrant sur les roulettes.



Poussez la colonne de direction vers l'intérieur jusqu'à ce que la roue avant et le loquet s'enclenchent fermement en place. Poussez ensuite fermement la colonne pour la bloquer contre le châssis.



Veillez noter que ce dépliant n'est qu'un guide rapide. Pour des instructions complètes, veuillez vous référer à notre manuel d'utilisation. Si vous avez des questions, veuillez nous appeler au +44 800 915 0800 ou nous envoyer un courriel à services@efoldi.com.