



GUIDE RAPIDE


Dépliage de la trottinette eFOLDi Explorer




Avant de commencer, redressez le scooter dans un espace ouvert loin des animaux domestiques et des jeunes enfants.

Le dépliage du scooter est simple, avec un peu de pratique, vous pourrez le configurer en quelques secondes.

Nous vous conseillons de vous entraîner avec le scooter avant de vous aventurer pour la première fois.

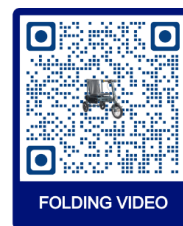

FOLDING VIDEO

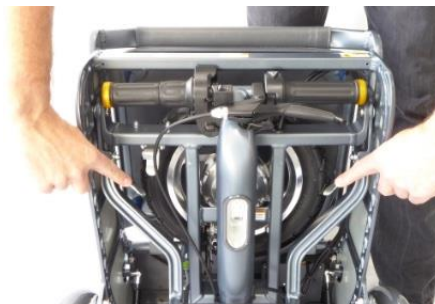

1

Repérez les loquets « B » et « C ».



2

Appuyez et maintenez les loquets « B » et « C » et..



3

Tirez la poignée de transport vers le haut.



4

Relâchez le guidon en tirant vers vous.



5

Tout en poussant le guidon vers le bas et vers l'intérieur, relâchez le loquet « E ».



6

Tirez la colonne de direction vers le haut et au-dessus de la poignée de transport jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.



7

Relâchez la roue avant par une traction ou une torsion brusque.



8

Abaissez le scooter au sol en tenant soigneusement.



9

Tirez la colonne de direction vers le haut..



10

..et assurez-vous que la clé de la colonne se verrouille en place sous le loquet « A ».



11

Redressez le dossier du siège.






12




Poussez les repose-pieds vers le bas. Votre scooter est maintenant prêt.

Veillez noter que ce dépliant est destiné à être un guide rapide uniquement. Pour des instructions complètes, veuillez vous reporter à notre manuel d'utilisation du produit. Pour toute question, veuillez nous appeler au 0800 915 0800 ou envoyer un e-mail à hello@efoldi.com

Plier la trottinette eFOLDi Explorer

		
1 Repliez les repose-pieds en position verticale.	2 Rabattez le dossier du siège vers le bas.	3 Appuyez et relâchez le loquet « D ».
		
4 Repliez la colonne de direction à plat contre le siège.	5 Soulevez le scooter en position verticale.	6 Assurez-vous que la roue avant est à plat et verrouillée sur le cadre par son aimant.
		
7 Localisez le loquet « D ».	8 Tout en soutenant la colonne de direction, appuyez sur le loquet « D ».	9 ...et amenez la colonne de direction au-dessus de la poignée de transport.
		
10 Appuyez sur la colonne de direction dans le cadre jusqu'à ce que le loquet « E » se verrouille.	11 Appuyez le guidon contre le cadre jusqu'à ce que l'aimant le verrouille en place.	12 Appuyez et maintenez les loquets « B » et « C » et rabattez la poignée de transport vers le bas.

La batterie/chargeur eFOLDi Explorer

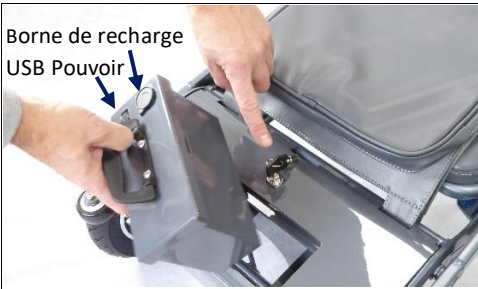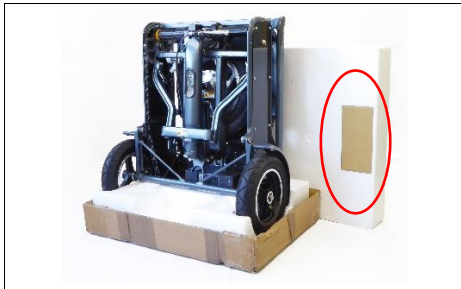 <p>Borne de recharge USB Pouvoir</p>		
Retirez la batterie en la déverrouillant à l'aide de la clé et en exerçant une légère pression. La batterie dispose de points de chargement et d'alimentation d'un appareil mobile.	Votre chargeur est situé à la base de l'un des revêtements en polystyrène.	Insérez la clé et allumez, tournez la poignée pour partir. Rechargez la batterie tous les 3 mois ou lorsque la jauge de puissance indique 24 ou moins.