



Stellen Sie den eFOLDi Lite vor der Benutzung in einem offenen Bereich auf, der von Haustieren und kleinen Kindern ferngehalten wird. Das Entfalten ist einfach, und mit etwas Übung können Sie ihn in Sekundenschnelle aufstellen. Wir empfehlen, vor Ihrem ersten Ausflug zu üben.



WIE ENTFALTEN

SCHRITT 1 - LÖSEN DER LENKSÄULE

Entfernen Sie alle Verpackungen, bevor Sie beginnen.



Drücken Sie auf die gelbe Verriegelung, um die Lenksäule zu entriegeln, so dass sie frei schwingen kann.

Heben Sie den Lenker nach außen und nach oben, bis er sicher in einer vertikalen Position einrastet.

SCHRITT 2 - ENTRIEGELN & ENTFALTEN



Halten Sie die Lenksäule und suchen Sie den kleinen gelben Knebel an der Seite des Lite und ziehen Sie daran, um die Vorderradbaugruppe zu entriegeln.

Halten Sie die Lenksäule und die Sitzlehne fest und ziehen Sie sie auseinander. Der Scooter klappt auf und Sie hören ein Klicken, wenn er in seiner offenen Position einrastet.

SCHRITT 3 - LETZTE SICHERHEITSKONTROLLEN



Vergewissern Sie sich, dass die Verriegelungsklinken sicher an der Stahlstange befestigt sind, indem Sie mit dem Fuß auf die Fußplatte drücken.



Vergewissern Sie sich, dass der rote Magnetbremshebel in der Position VERRIEGELT steht, um den Motor einzuschalten.

ERSTE SCHRITTE

BEDIENUNGSANLEITUNG



Um den Roller einzuschalten, drücken Sie die graue Taste unter der Batterieanzeige. Wählen Sie (D) für Fahren oder (R) für Rückwärtsfahren, und drücken Sie dann den Daumengashebel, um loszufahren.

Achten Sie darauf, den Akku wieder aufzuladen, sobald die Anzeige gelb leuchtet.



Um den Scooter in ein Rollgepäck zu verwandeln, ziehen Sie den Lenker nach oben und drücken Sie den gelben Hebel, um ihn am zweiten Anschlagpunkt zu sichern.



Zum Aufladen schließen Sie das Stromversorgungska- bel an den Ladeanschluss oben an der Lenksäule an.



Um den Akku zu entfernen, heben Sie die Verriegelung an und ziehen Sie ihn vorsichtig nach oben.

Der Ladeanschluss befindet sich an der Seite des Akkus.

WIE MAN SIE ZUM AUFBEWAHREN FALTET

SCHRITT 1 - UMKLAFFEN DER RÜCKENLEHNE UND DER LENKSÄULE



Klappen Sie die Rückenlehne des Sitzes flach an die Sitzfläche heran.



Mit montierten Armlehnen, ziehen Sie den schwarzen Knebel, um den Sitz zu lösen und umzuklappen.



Drücken und halten Sie die kleine gelbe Verriegelung an der Vorderseite der Lenksäule und klappen Sie sie dann nach unten, bis der Lenker einrastet und durch den Magneten gesichert ist.



SCHRITT 2 - ZUSAMMENKLAFFEN UND VERRIEGELN DES SCOOTERS



Fassen Sie den Scooter an der Lenksäule und am Tragegriff und heben Sie den Sitzrahmen in eine aufrechte Position.



Kippen Sie den Scooter schräg nach hinten (Sie können Ihren Fuß hinter dem Rad benutzen, um ihn zu stabilisieren) und balancieren Sie ihn auf den Rollen aus.



Drücken Sie die Lenksäule nach innen, bis das Vorderrad und die Verriegelung sicher einrasten. Drücken Sie dann fest auf die Säule, um sie fest am Rahmen zu verriegeln.



Bitte beachten Sie, dass dieses Merkblatt nur als Kurzanleitung gedacht ist. Vollständige Anweisungen finden Sie in unserem Produkthandbuch. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns bitte unter +44 800 915 0800 an oder senden Sie eine E-Mail an services@efoldi.com.