



## KURZANLEITUNG – DEUTSCH

### Entfalten des eFOLDi Explorer Scooters

eFOLDi 

Stellen Sie den Roller vor dem Start aufrecht hin in einem offenen Raum fern von Haustieren und kleinen Kindern.

Das Aufklappen des Scooters ist unkompliziert, mit ein wenig Übung können Sie ihn in Sekundenschnelle aufbauen.

Wir empfehlen Ihnen, den Umgang mit dem Roller zu üben, bevor Sie sich zum ersten Mal auf den Weg machen.



**1** Suchen Sie die Riegel „B“ und „C“.

**2** Halten Sie die Riegel „B“ und „C“ gedrückt und...

**3** ...ziehen Sie den Zieh-/Tragegriff nach oben.



**4** Lösen Sie den Lenker, indem Sie ihn zu sich ziehen.

**5** Während Sie den Lenker nach unten und innen drücken, lösen Sie die „E“-Verriegelung.

**6** Ziehen Sie die Lenksäule nach oben und über den Tragegriff, bis sie einrastet.



**7** Lösen Sie das Vorderrad durch kräftiges Ziehen oder Drehen.

**8** Senken Sie den Roller vorsichtig auf den Boden ab.

**9** Ziehen Sie die Lenksäule nach oben...



**10** ...und stellen Sie sicher, dass der Säulenschlüssel unter der Verriegelung „A“ einrastet.

**11** Pull the seat back upright.

**12** Push the footpegs down. Your scooter is now ready.

## Zusammenklappen des eFOLDi Explorer Scooters



**1** Klappen Sie die Fußrasten in eine aufrechte Position.



**2** Klappen Sie den Sitz wieder nach unten.



**3** Drücken Sie den Riegel „A“ und lassen Sie ihn los.



**4** Klappen Sie die Lenksäule flach gegen den Sitz.



**5** Heben Sie den Roller in eine aufrechte Position.



**6** Stellen Sie sicher, dass das Vorderrad flach ist und durch seinen Magneten am Rahmen befestigt ist.



**7** Suchen Sie den Riegel „D“.



**8** Während Sie die Lenksäule abstützen, drücken Sie die Verriegelung „D“...



**9** ...und bringen Sie die Lenksäule über den Tragegriff.



**10** Drücken Sie die Lenksäule in den Rahmen, bis die Verriegelung „E“ einrastet.



**11** Drücken Sie den Lenker gegen den Rahmen, bis der Magnet ihn einrastet.




**12** Halten Sie die Riegel „B“ und „C“ gedrückt und klappen Sie den Tragegriff nach unten.

## eFOLDi Explorer Akku/Ladegerät



Entfernen Sie den Akku, indem Sie ihn mit dem Schlüssel entriegeln und leichten Druck ausüben. Der Akku verfügt über Anschlüsse zum Aufladen und zur Stromversorgung eines Mobilgeräts.

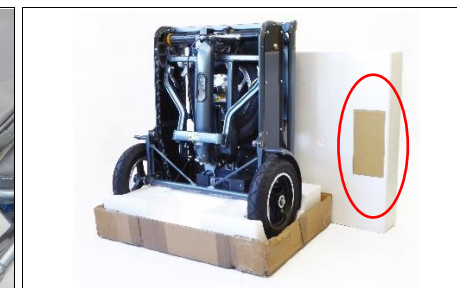

Ihr Ladegerät befindet sich im Boden einer der Styroporauskleidungen.



Stecken Sie den Schlüssel ein und drehen Sie ihn, um das Gerät einzuschalten. Drehen Sie den Griff, um loszulegen.  
**Laden Sie den Akku alle 3 Monate auf oder wenn die Leistungsanzeige 24 oder weniger anzeigt.**