

ð brjóta upp eFOLDi Power Chair

Áður en byrjað er að setja rafmagnsstólinn á opið rými fjarri gæluþrym og litlum börnum.

Uppbrot er einfalt og með smá æfingu muntu geta sett það upp á nokkrum sekúndum.

Við ráðleggjum þér að æfa með Power Chair áður en þú ferð út í fyrsta skipti.



FOLDING VIDEO



1 Veltvarnarhjól og hleðslutæki fylgja með rafmagnsstólum þínum.

2 Settu veltvarnarhjólinn upp. Þessar einfaldlega þrýsta og læsast á sinn stað.

3 Felldu rafmagnsstólnum upp með því einfaldlega að ýta sætisbotninum niður á meðan þú dregur losunarstöngina upp.



4 Settu armpúðastuðninginn í raufin og þrýstu þeim niður þar til þær læsast. **Haltu snúrum í burtu frá klemmstöðum**

5 Taktu stýrieinguna og stöngina og...

6 ...stýrðu stýristönginni í armpúðarfestinguna undir armpúðanum...



7 stilltu stöðu stjórnandans og hertu með hnúða hnúðnum.

8 - Fjarlægðu stjörnbúnaðinn úr bakvasanum og festu hana við stöngina að aftan.

9 Dragðu fótfestu niður.



10 Settu sætisþúða upp eins og sýnt er. Þessum er haldið á sínum stað með Velcro flipum. Gakktu úr skugga um að þetta sé brotið saman yfir bakstöð og undir sæti.

11 Settu rafhlöður í þar til þær smella á sinn stað. Rafmagnsstólinn þinn er nú tilbúinn.

12 Kveiktu á Power Chair með því að ýta á POWER hnappinn. Skoðuðu handbókina þína fyrir allar upplýsingar.


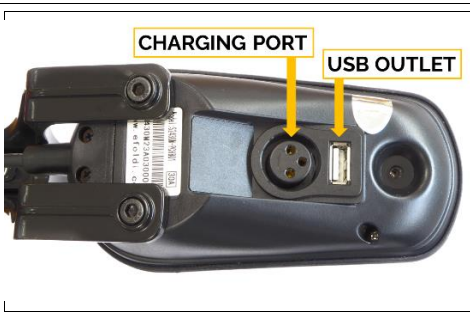

Að leggja saman eFOLDi Power Chair

		
<p>1 Slökktu á rafmagninu með því að nota POWER hnappinn á handstýringunni. Slökktu alltaf á rafmagninu þegar stóllinn er ekki í notkun til að spara rafhlöðuna.</p>	<p>2 Losaðu örliðið hnúða hnappinn og fjarlægðu stjórnandann. Settu stjórnækið og öryggisbeltið á sætisþúðann. Herðið hnúðinn aftur til að koma í veg fyrir tap.</p>	<p>3 Fjarlægðu stjórnþúnaðinn og settu hana í vasa aftan á stólnum.</p>
		
<p>4 Athugaðu að framhjólín séu staðsett á undan til að tryggja slétta fellinguna. <i>Dragðu stólinn aftur á bak til að stilla hjólin saman</i></p>	<p>5 áðu undir brún sætis og dragðu losunarstóngina upp til að losa sætið og-</p>	<p>6 ...dragðu sætið upp og í áttina að þér til að leggja rafmagnsstólinn saman. Felldu fótfestu inn.</p>

eFOLDi Power Chair rafhlaða hleðsla

		
<p>Til að hlaða Power Chair skaltu stinga hleðslutenginu í botn stýripinnastýringarinnar og tengja rafmagnsklóna við rafmagnsinnstunguna. Þetta mun hlaða BÆDAR rafhlöðurnar samtímis.</p>	<p>Til að fjarlægja rafhlöður fyrir ferðalög eða einstaka hleðslu ýttu á rauða flipann upp og renndu rafhlöðunni aftur á bak.</p>	<p>Hægt er að hlaða rafhlöður aðskildar frá stólnum með því að nota stutta „pigtail“ millistykkið sem þarf að tengja við hleðslunúruna fyrst.</p>

eFOLDi Power Chair Rekstur

		
<p>Símtóstýringin hefur hnappa til að stilla hraða og skjái til að gefa til kynna afl sem eftir er og hraðastillingu.</p> <p>Þú getur slökkt á bakkhljóðgjafanum með því að ýta á hnappinn sem tilgreindur er.</p>	<p>Hleðslutengi fyrir Power Chair er staðsett undir símtólinu til að hlaða BÆDAR rafhlöður samtímis.</p> <p>Það er líka USB innstunga til að knýja síma eða annað USB tæki.</p>	<p>Hægt er að stilla stjórnanda til að stilla gönguhraða fyrir aðstoðarmann/umönnunaraðila og veitir einnig rafhlöðuskoðun.</p> <p>Stöngin stjórnar hreyfingu aftur á bak eða áfram.</p>

Vinsamlegast athugið að þessum fylgiseðli er eingöngu ætlað að vera leiðbeiningar. Fyrir allar leiðbeiningar, vinsamlegast skoðaðu notendahandbókina okkar.

Allar spurningar, vinsamlegast hringdu í okkur í síma 0800 915 0800 eða sendu tölvupóst á hello@efoldi.com