



## HURTIGGUIDE – NORSK

### Utfolding av eFOLDi Explorer Scooter




eFOLDi


Stå scooteren oppreist før start  
i en åpen plass unna kjæledyr og små barn.

Å brette ut scooteren er grei, med litt øvelse vil du kunne sette  
den opp på sekunder.

Vi anbefaler deg å øve med scooteren før du begir deg ut for  
første gang.

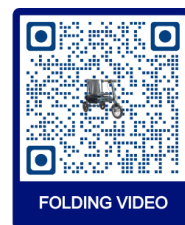

FOLDING VIDEO

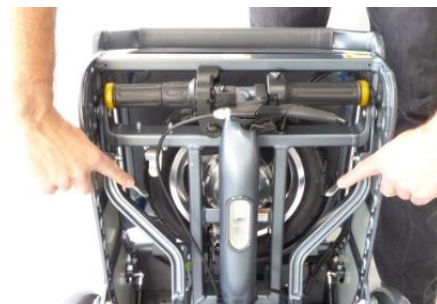

1

Finn 'B' og 'C' låsene.



2

Trykk og hold inne 'B' og 'C' låsene  
og...



3

...trekk dra/bærehåndtaket opp.



4

Slipp styret ved å trekke mot  
deg.



5

Mens du skyver styret ned og  
innover, slipp 'E'-låsen.



6

Trekk rattstammen opp og over  
bærehåndtaket til det låses på  
plass.



7

Slipp forhjulet ved å dra eller  
vri.



8

Senk scooteren forsiktig til bakken.



9

Trekk rattstammen oppreist...



10

...og sørg for at  
kolonnenøkkelens låses på  
plass under låsen 'A'.



11

Trekk seteryggen oppreist.



12

Skyv fotpinnene ned.  
Scooteren din er nå klar.

## Sammenlegging av eFOLDi Explorer Scooter



**1** Brett fotpinnene til oppreist stilling.



**2** Fell setet ned igjen.



**3** Trykk og slipp låsen 'A'.



**4** Brett rattstammen flatt mot setet.



**5** Løft scooteren til oppreist stilling.



**6** Sørg for at forhjulet er flatt og låst til rammen med magneten.



**7** Finn låsen 'D'.



**8** Mens du støtter rattstammen, trykk på låsen 'D'...



**9** ...og før rattstammen over bærehåndtaket.



**10** Trykk rattstammen inn i rammen til låsen 'E' låses.



**11** Trykk styret mot rammen til magneten låser dem på plass.




**12** Trykk og hold låsene 'B' og 'C' og brett ned bærehåndtaket.

## eFOLDi Explorer batteri/lader



Ta ut batteriet ved å låse opp med nøkkelen og trykke forsiktig. Batteriet har punkter for lading og for strøm til en mobil enhet.

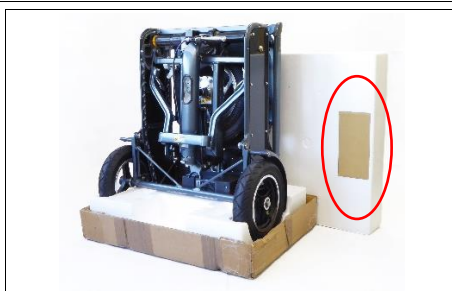

Laderen din er plassert i bunnen av en av polystyrenforingene.



Sett inn nøkkelen og slå på strømmen, vri grepet for å gå.  
**Lad opp batteriet hver tredje måned eller når strømmåleren viser 24 eller mindre.**