



## SZYBKA PORADA Rozkładanie hulajnogi eFOLDi Lite



eFOLDi

Przed uruchomieniem ustaw hulajnogę pionowo na otwartej przestrzeni z dala od zwierząt domowych i małych dzieci.

Rozkładanie hulajnogi jest proste i przy odrobinie wprawy będziesz w stanie rozłożyć ją w kilka sekund.

Radzimy poćwiczyć jazdę na hulajnodze przed pierwszą wyprawą.



FOLDING VIDEO



1

Zwolnij żółty zatrzask kolumny kierownicy....



2

...i pozwól kolumnie swobodnie się kotuszać.



3

Wyciągnij kierownicę na zewnątrz i do góry...



4

...dopóki nie ustawią się w pionowej linii.



5

Znajdź mały żółty przetacznik z boku i pociągnij, aby zwolnić zespół przedniego koła.



6

Przytrzymaj kolumnę kierownicy i oparcie siedzenia i rozsuń je...



7

...hulajnoga rozłoży się, gdy rozłożysz oparcie siedzenia i kolumnę kierownicy i...



8

...skuter zablokuje się w pozycji otwartej.



9

Upewnij się, że zatrzaski blokujące zatrzasknęły się na stalowym pręcie...



10

...jeśli nie, naciśnij stopę na podnóżek, aby zablokować hulajnogę w pozycji otwartej



11

Jeśli nie zostały jeszcze zainstalowane, zamontuj poduszki siedzenia i oparcie siedzenia, jak pokazano.



12

Sprawdź, czy hamulec magnetyczny jest w położeniu ZABLOKOWANYM, aby włączyć silnik.

## Składanie hulajnogii eFOLDi Lite

<p><b>1</b></p> <p>Złóż oparcie siedzenia do podstawy siedzenia.</p>	<p><b>2</b></p> <p>Jeśli hulajnoga posiada podłokietniki, pociągnij czarny przelącznik, aby zwolnić, a następnie złóż oparcie zgodnie z (1)</p>	<p><b>3</b></p> <p>Naciśnij i przytrzymaj matę żółty zatrask na kolumnie kierownicy...</p>
<p><b>4</b></p> <p>złóż kolumnę w dół, az zamykana na zatrask magnetyczny.</p>	<p><b>5</b></p> <p>Mocno chwyć hulajnogę za kolumnę kierownicy i uchwyt do przenoszenia i mocno dociśnij kolumnę w kierunku podnóżka</p>	<p><b>6</b></p> <p>Przechyl hulajnogę do tyłu pod kątem i użyj stopy za kierownicą, aby zatrzymać odsuwanie się od Ciebie</p>
<p><b>7</b></p> <p>...naciśnij kolumnę kierownicy do wewnątrz, az przednie koło zablokuje się na swoim miejscu...</p>	<p><b>8</b></p> <p>...i zatrask kolumny kierownicy blokuje się na swoim miejscu.</p>	<p><b>9</b></p> <p>Dociśnij kolumnę kierownicy, aby mocno zamocować ją na ramie.</p>

## Obsługa eFOLDi Lite

<p>Aby włączyć hulajnogę, naciśnij szary przycisk pod wyświetlaczem baterii.</p> <p>Wybierz (D) Drive lub (R) Reverse i naciśnij kciuk, aby ruszyć.</p>	<p>Akumulator można ładować za pomocą portu ładowania, jak pokazano.</p> <p>Zawsze należy jak najszybciej natadować akumulator jak to możliwe, gdy wyświetlacz jest wskazujący na bursztyń.</p>	<p>Akumulator można wyjąć, podnosząc zatrask i podnosząc akumulator w górę.</p> <p>Po wyjęciu akumulator można natadować korzystając z gniazda znajdującego się z boku akumulatora.</p>

Należy pamiętać, że ta ulotka ma jedynie charakter krótkiego przewodnika. Pełne instrukcje można znaleźć w naszej instrukcji obsługi produktu. Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas pod numer 0800 915 0800 lub wyślij e-mail na adres [Services@efoldi.com](mailto:Services@efoldi.com)